



**Kangerjian**  
康尔健医疗

# 手动病床

使  
用  
说



山东曲阜康尔健医疗科技有限公司

**【产品名称】：**手动病床

**【产品型号】：**三摇床

**【产品规格】：**2173\*980\*470/630mm±20

床板：2000\*860mm±20

**【备案编号】：**鲁宁械备 20170002 号

**【技术参数】：**背部升降 0-75±5°，腿部升降 0-45±5°，

整体升降 380mm

**【产品说明】：**

- 1、床架：采用优质型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方。
- 2、床板：床板运用精妙的分段式构造，精心划分出贴合人体的背部、臀部、大腿部及小腿部分这四大区域，由 10 段精密拼接而成。在选材上，采用质地坚韧、抗疲劳性能出色的优质冷轧钢板，凭借先进的一次冲压成型工艺，确保床板整体结构稳固，具备卓越的耐用性。床板中心均匀分布着 66 个开孔，不仅能有效促进空气流通，提升睡眠的舒适感，还巧妙地减轻了床板自重，进一步优化了耐用性能。表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁。
- 3、床头、床尾：采用 ABS 优质工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和，并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸。
- 4、摇手：不锈钢隐藏式手摇柄，双向极限保护。
- 5、脚轮：五寸刹车轮，高耐磨，无噪音，带四角刹车装置。
- 6、护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计。
- 7、可选配置：床垫，输液杆，床头，伸缩/翻转餐桌。



## 【安装说明】:

例图:



图 1

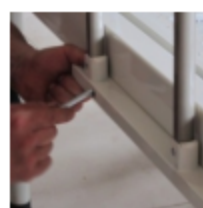


图 2

- 1、将床头尾与床框两侧挂钉相对扣入并卡号保险扣。注意床尾（矮）挂在摇把一端。（如图 1）
- 2、护栏安装：安装护栏时，将护栏的两端固定孔与床框的预留孔对齐，插入螺栓（M8\*80）固定紧螺栓。（如图 2）

## 【使用方法】:

- 1、摇把使用：顺时针旋转摇把，背、腿、床面上升,反之操作,背、腿、床面下降。
- 2、护栏使用：手握枪式开关红色按钮，向上提拉立柱直立为防护状态，向下按压为收起状态。

## 【注意事项】:

- 1、检查床头是否卡紧、床腿及各紧固部位是否紧固。
- 2、安全工作载荷 220kg。
- 3、传动机构要经常加注润滑油。如安装脚轮，要经常检查脚轮是否牢固，如不牢固可重新紧固螺丝



## 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司

住所、生产地址：曲阜市高速北二路北(工业一路西)

邮编：273155

传真：0537-4661234

电话：0537-4662888

售后服务电话：15005472717

免费电话：400-6767-944

网址：[www.chinakejyl.com](http://www.chinakejyl.com)

